



Abformdesinfektion Gebrauchsanweisung

Art der Anwendung: Das gebrauchsfertige Abformdesinfektionsmittel wird zur Desinfektion und Reinigung aller dentalen Abformmaterialien.

Hinweise zur Anwendung: Die betreffende Abformung für 5 Minuten in die gebrauchsfertige Lösung einlegen. Es ist darauf zu achten, dass die Abformung vollständig mit der Lösung bedeckt ist. Im Falle von Alginaten und Hydrokolloiden empfiehlt sich ein kurzes Eintauchen der Abformung in die Lösung mit anschließendem Abtrocknen für mind. 5 Minuten. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen.

Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 1276, EN 1040 und VAH/DGHM, levurozid nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650; "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV und Rota-Viren).

Einwirkzeiten: Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM (hohe Belastung):
Konz.: 5 min.
Candida albicans nach VAH/DGHM (hohe Belastung):
Konz.: 5 min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA(RKI)/DVV mit Belastung:
Konz.: 5 min.
Rota-Viren nach DVV:
Konz.: 5 min.

Wirkstoffzusammensetzung: In 100g sind enthalten:
0,16g N-Alkyl(C12-C18)-N-benzyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
0,16g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
0,16g N-Alkyl(C12-C14)-N-ethylbenzyl-N,N-dimethylammoniumchlorid.“ (gemäß Biozidrichtlinie 98/8/EG)

Besondere Hinweise: Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
(gemäß Biozidrichtlinie 98/8 EG)



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

CE0044