



Absauganlagendesinfektionsmittel Konzentrat Gebrauchsanweisung

- Art der Anwendung:** Zur Reinigung und Desinfektion von dentalen Absauganlagen und Mundspülbecken.
- Hinweise zur Anwendung:** Das Absauganlagendesinfektionsmittel muss zuerst mit Wasser verdünnt werden. Es wird in 2 %iger Konzentration angewendet (20 ml Konzentrat auf 1 ltr. Wasser). Ungefähr einen Liter der Lösung durchsaugen. Die Sauganlage sollte je nach Belastung ein- bis zweimal täglich desinfiziert werden. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen.
- Wirkungsspektrum:** Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, EN 1276. Levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562, EN 1650. "Begrenzt viruzid"(wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV,HIV, HCV) nach BGA(RKI)/DVV.
- Einwirkzeiten:** Bakterien und Candida albicans nach VAH/DGHM als Instrumentendesinfektion (hohe Belastung):
2,0% 5min.
1,0% 60min.
Bakterien nach EN 1276 (hohe Belastung):
2,0% 5min.
Candida albicans nach EN 1650 (hohe Belastung):
2,0% 5min.
Bakterien nach EN 13727 und EN 14561 (hohe Belastung):
3,0% 2min.
Candida albicans nach EN 13624 und EN 14562 (hohe Belastung):
3,0% 2min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA(RKI)/DVV (mit Belastung):
2,0% 2min.



Verdünnungstabelle für das Konzentrat

| Gebrauchslösung | 2 %ig |
|-----------------|-------|
| 1 Liter | 20ml |
| 3 Liter | 60ml |
| 5 Liter | 100ml |
| 10 Liter | 200ml |

Wirkstoffzusammensetzung:

In 100g sind enthalten:
7,5g Dimethyldioctylammoniumchlorid,
0,6g Benzyltrimethyldecylammoniumchlorid
(gemäß Biozidrichtlinie 98/8/EG)

Besondere Hinweise/
Sicherheitshinweise:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S 24 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 37/ 39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.



Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
(Biozidrichtlinie 98/8/EG)



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

CE0044