



Alginat Blue Gebrauchsanweisung

Schnellabbindendes Präzisions-Alginat für Dentalabdrücke

ISO 1563
Aroma: Minzaroma
Farbe: blau

Vor Gebrauch den Beutel/Behälter gut durchschütteln, um die verschiedenen Bestandteile zu vermischen.

Dosierung:
Teilabdruck

Ein Messbecher Pulver +
Ein Messbecher Wasser

Komplettabdruck

Zwei Messbecher Pulver +
Zwei Messbecher Wasser

Achtung: Den Messbecher mit Pulver bis zum Rand befüllen, jedoch nicht zusammendrücken. Das Gemisch bitte kräftig spateln.

(Eine mehr oder weniger dickflüssige Mischung erhält man durch das leichte Variieren der verwendeten Wassermenge.)

Anmischzeit: 35''

Verarbeitungszeit: 1'20'' ab Mischungsbeginn

Abbindezeit: 2' ab Mischungsbeginn

Die angegebenen Zeiten basieren auf einer Wasser - und Raumtemperatur von 23° C. Temperaturabweichungen oder Änderungen des Härtegrades können zu leichten Zeitabweichungen führen. Eine niedrigere Temperatur steigert die Mischungs- und Abbindezeit, und eine höhere Temperatur verringert die Mischungs- und Abbindezeit.

Um Überreste und Speichel zu beseitigen den Abdruck unter fließendem Wasser gut spülen. Wir empfehlen den Abdruck sofort auszugießen, oder in feuchter Watte (darf nicht mit dem Abdruck in Berührung kommen) und einem gut verschlossenen Plastikbeutel bei 10-20°C aufzubewahren.

Den original verpackten Beutel gut verschlossen, trocken und kühl (10-20° C) aufbewahren. Nach Gebrauch den Behälter immer gut verschließen.

Charge / Haltbarkeit siehe Beutelprägung



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

