

Alginat Color Gebrauchsanweisung

Schnellabbindendes Präzisions-Alginat für Dentalabdrücke mit Farbindikator

ISO 1563

Aroma : Vanillearoma

Vor Gebrauch den Beutel/Behälter gut durchschütteln, um die verschiedenen Bestandteile zu vermischen.

Dosierung:

Für einen kompletten Abdruck benötigt man 2 Messbecher Pulver (19g) und 2 Messbecher Wasser (40ml). Achtung: Den Messbecher mit Pulver bis zum Rand befüllen, jedoch nicht zusammendrücken. Die Mischung gut durchspateln.

(Eine mehr oder weniger dickflüssige Mischung erhält man durch das leichte Variieren der verwendeten Wassermenge.)

Anmischzeit: 35'' (wird durch die farbige Phase „violett“ angezeigt).

Verarbeitungszeit: 1'20'' ab Mischungsbeginn (wird durch die farbige Phase „weiß“ angezeigt).

Abbindezeit: 2'00'' ab Mischungsbeginn (wird durch die Endfarbe „hellblau“ angezeigt).

Die angegebenen Zeiten basieren auf einer Wasser – und Raumtemperatur von 23° C. Temperaturabweichungen oder Änderungen des Härtegrades des verwendeten Wassers können zu leichten Zeitabweichungen führen. Eine niedrigere Temperatur steigert die Mischungs- und Abbindezeit, und eine höhere Temperatur verringert die Mischungs- und Abbindezeit.

Um die besten Resultate zu erzielen sowie um Überreste und Speichel zu beseitigen wird empfohlen den Abdruck unter fließendem Wasser gut zu spülen, und darauffolgend den Abdruck sofort auszugießen. Den Abdruck nicht im Wasser sondern in feuchter Watte (darf nicht mit dem Abdruck in Berührung kommen) und einem gut verschlossenen Plastikbeutel bei 10-20°C aufbewahren.

Den original verpackten Beutel gut verschlossen, trocken und kühl (10 - 20° C) aufbewahren. Nach Gebrauch den Behälter immer gut verschließen.

Charge/Haltbarkeit siehe Beutelprägung/Aufdruck



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

