



## **Anleitung zur Mundspiegelpflege**

ORBIS Mundspiegel: Standard, frontbeschichtet, hauchfrei

### **Generell:**

1)Mundspiegel und Mundspiegelgriff immer getrennt aufbereiten.

2)Gerades Eindrehen des Mundspiegelgriffes damit das Gewinde durch Verkanten nicht beschädigt wird.

3)Nach der Sterilisation im Autoklaven unbedingt die Abkühlphase im Autoklaven einhalten, nicht vorher herausnehmen.

Die Spiegel nach der Abkühlphase nicht im Nassen liegen lassen, sondern gleich sorgfältig trocknen, um eingebrannte Wasserflecken zu vermeiden.

Demineralisiertes Wasser: Für den Gebrauch im Autoklaven demineralisiertes Wasser verwenden!

### Orbis Mundspiegel frontbeschichtet:

Da eine hauchdünne Beschichtung aufgedampft ist, ist eine gewisse Vorsicht für die Behandlung auf der Glasoberfläche geboten.

### **Reinigung:**

Hartnäckige Verunreinigungen gründlich entfernen. Empfehlung: „Orbis Orange Solvent“. Anschließend die Mundspiegel trocknen.

### **Desinfektion:**

Kontaminierte Mundspiegel in eine geeignete Instrumenten-Desinfektionslösung legen.

### **Wichtig: Unbedingt folgendes beachten:**

1) Konzentration der Desinfektionslösung gemäß Anweisung des Herstellers.

2) Zeitdauer der Desinfektion gemäß Anweisung des Herstellers.

3) Nach der Desinfektion sorgfältig mit Wasser abspülen.

### **Sterilisation:**

**Möglich:** Autoklav

Wichtig: Nur absolut trockene Mundspiegel in den Sterilisator legen, sonst können durch die hohe Hitze Einbrennungen oder Korrosion entstehen.

**Nicht möglich:** - Sterilisation und Aufbewahrung in Folie  
- Ultraschallreinigung  
- maschinelle Reinigung und Desinfektion im  
RDG

Temperatur: max. 200° C



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH  
Schuckertstrasse 21  
48153 Münster

