



Desinfektionstücher

Gebrauchsanweisung

Artikelnummer 181925

- Art der Anwendung:** Gemäß MPG: Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten.
Gemäß Biozid-Richtlinie: Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen.
- Hinweise zur Anwendung:** Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. für Acrylglas nicht geeignet). Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 30 Tage in Entnahmeboxen verwendbar.
- Wirkungsspektrum:** Bakterizid (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040, EN 1276; levurozid(Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650; tuberkulozid nach VAH/DGHM, EN 14348, "begrenzt viruzid" (wirksam gegenüber be-hüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV), Adeno-Viren.
- Einwirkzeiten:** Bakterien nach VAH/DGHM, EN 1040 und EN 1276 (hohe Belastung):
Konz. 1min.
Candida albicans nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650 (hohe Belastung), EN 1275:
Konz. 1min.
TbB (Tuberkulose)-Inaktivierung nach VAH/DGHM, EN 14348 (hohe Belastung):
Konz. 1min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA (RKI) / DVV mit Belastung):
Konz. 30sec.
Adeno-Viren (EN 14476):
Konz 1 min..



Wirkstoffzusammensetzung:

In 100g sind enthalten:
43,0g Ethanol, 8,0g 1-Propanol, 0,04g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Besondere Hinweise/
Sicherheitshinweise:

R 11 leicht entzündlich
S 7 Behälter dicht verschlossen halten.
S 16 Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 25°C. Ausbringung max. 50ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten.

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster



CE 0044