



Desinfektionstücher groß, alkoholfrei

Gebrauchsanweisung

Artikelnummer 10453

- Art der Anwendung:** Gemäß MPG: Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten.
Gemäß Biozid-Richtlinie: Alkoholfreie Feuchttücher zur Desinfektion von Flächen. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.
- Hinweise zur Anwendung:** Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden.
- Wirkungsspektrum:** Bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 1040, EN 1276, EN 13697; levurozid(Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, EN 13697;“begrenzt viruzid” (wirksam gegenüber behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV) und wirksam gegenüber unbehüllten Rota-Viren.
- Einwirkzeiten derTränkflüssigkeit:** Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH/DGHM, EN 1040 und EN 1276, EN 13697 (hohe Belastung):
Konz. 1min.
Candida albicans nach VAH/DGHM, EN 1275, EN 1650, EN 13697 (hohe Belastung):
Konz. 1min.
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA (RKI) / DVV(mit Belastung)
Konz. 1min.
Rota-Viren nach BGVV/DVV:
Konz 1 min..



Wirkstoffzusammen-
setzung:

In 100g sind enthalten:
0,24g Dialkyldimethylammoniumchlorid
0,48g Alkyl(Aryl)dimethylammoniumchlorid

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

CE0044