

## Bisswalle, Bissnehmewachs Gebrauchsanweisung

**Verwendung:** Bisswalle/Bissnehmewachs zur Verwendung im zahntechnischen Labor, besonders in der Total- und Teilprothetik. Zur Bissnahme bzw. Festlegung der Bissituation, kurzfristig im Munde des Patienten. Durch Erwarmung (offene Bunsenflamme/ Wasserbecken) sind die Bisswalle in der Form veranderbar. Das Erweichen oder Verflussigen des Wachses zur eigentlichen Bissnahme im Munde des Patienten ist mit geeigneten Instrumenten immer auerhalb des Patienten durchzufuhren. Nur ausreichend groe und nicht zu heie Stucke in den Patientenmund einfuhren, um ein Verschlucken, Ersticken oder Verbrennen der Schleimhaute zu vermeiden.

**Risiken und Gefahren in der Anwendung:**

- Sicherstellen, dass sachunkundige (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Beruhung kommen.
- Heie Wachstropfen auf Hautoberflachen vermeiden. Einatmen der Wachsdampfe beim Verbrennen / Ausbrennen vermeiden. (Schutzkleidung nach Bedarf)
- Wachs darf nur kurzzeitig und nicht dauerhaft im Munde des Patienten eingebracht werden.
- Bisswall zum Basiskorper so verbinden, dass eine Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr fur den Patienten nicht besteht.

Bei nicht bestimmungsgemaer Verwendung erloschen samtliche Garantie und Haftungsanspruche!

**Haltbarkeit:** Verbrauchsmaterial sollte generell nach Offnen der Originalverpackung zugig und umgehend innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden.

**Lagerbedingungen:** Lagerung bei Raumtemperatur mind. +10° C bis + 30° C Vor direkter Sonneneinstrahlung schutzen, bei Temperaturen unter 8° C, besonders bei Temperaturen im Minusbereich, erhohte Bruchanfalligkeit. Packungen vor Schlag und Sturz schutzen.



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH  
Schuckertstrasse 21  
48153 Munster

