



Adhäsiv-Liquid Alginat Gebrauchsanweisung

Präparatetyp: Flüssiges Adhäsiv zur Vergrößerung der Haftkraft von dentalen Abformmaterialien.

Anwendungsgebiet: Pinseladhäsiv für alle gängigen Alginat. Der Haftfilm erhöht zuverlässig die Haftung des Abformmaterials zum Löffelmaterial (Metall oder Kunststoff).

Hinweise zur Anwendung: Die Flasche sollte vor der Verwendung kurz geschüttelt werden. Der Abformlöffel wird mit dem Pinsel gleichmäßig bestrichen. Nach einer kurzen Trocknungszeit von ca. 5min. kann das Alginatabformmaterial auf die fingertrockene Klebefläche aufgetragen werden. (Vorsicht bei dickerem Auftrag: Der Film sollte nicht mehr nass sein). Durch mehrfaches Auftragen ist die Schichtstärke und Klebekraft gut kontrollierbar. Reste des Klebers können mit Adhäsiv Löser Spray oder einem geeigneten Tray Cleaner entfernt werden.

Sicherheitshinweise: R 11 Leichtentzündlich.
S 09 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

