



Adhäsiv-Liquid Polyether Gebrauchsanweisung

Präparatetyp: Flüssiges Adhäsiv zur Vergrößerung der Haftkraft von dentalen Abformmaterialien.

Anwendungsgebiet: Pinseladhäsiv für alle gängigen Polyethermaterialien. Der Haftfilm erhöht zuverlässig die Haftung des Abformmaterials zum Metalllöffel.

Hinweise zur Anwendung: Die Flasche muss vor der Verwendung kurz geschüttelt werden. Der Abformlöffel wird mit dem Pinsel gleichmäßig bestrichen. Nach einer kurzen Trocknungszeit von ca. 5min. kann das gemischte Polyetherabformmaterial auf die trockene Klebefläche aufgetragen werden. Durch mehrfaches Auftragen ist die Schichtstärke und Klebekraft kontrollierbar. Reste des Klebers können mit Adhäsiv Löser Spray oder einem geeigneten Tray Cleaner entfernt werden.

Sicherheitshinweise: R 11 Leichtentzündlich.
R 63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S 09 Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder diese Gebrauchsinformation vorzeigen.

enthält: Toluol



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstrasse 21
48153 Münster

