



## Adhäsiv-Liquid Silikon Gebrauchsanweisung

Präparatetyp: Flüssiges Adhäsiv zur Vergrößerung der Haftkraft von dentalen Abformmaterialien.

Anwendungsgebiet: Pinseladhäsiv für alle gängigen additionsvernetzende Silikone. Der Haftfilm erhöht zuverlässig die Haftung des Abformmaterials zum Löffelmaterial.

Hinweise zur Anwendung: Der Abformlöffel wird mit dem Pinsel gleichmäßig bestrichen. Nach einer kurzen Trocknungszeit von ca. 5min. kann das Silikonabformmaterial auf die trockene Klebefläche aufgebracht werden. Durch mehrfaches Auftragen des Adhäsivs ist die Schichtstärke und Klebekraft kontrollierbar. Reste des Klebers können mit Adhäsiv Löser Spray oder einem geeigneten Tray Cleaner entfernt werden.

Sicherheitshinweise: R 11 Leichtentzündlich.  
R 38 Reizt die Haut.  
R 48/20 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.  
R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R 62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.  
R 63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.  
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
S 09 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
S 16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.  
S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.  
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder diese Gebrauchsinformation vorzeigen.





enthält:

Toluol, n-Hexan



Orbis Dental Handelsgesellschaft mbH  
Schuckertstrasse 21  
48153 Münster

